

# Kaßla®

## PSA - CERTUM®

Prueba Rápida Semi-Cuantitativa para PSA  
(Sangre/Suero/Plasma)



The logo for CERTUM DIAGNOSTICS, featuring a stylized orange wave above the word 'CERTUM' in a bold, sans-serif font, with 'DIAGNOSTICS' in a smaller font below it.

Certum® Diagnostics tiene como objetivo cubrir con un alto grado de satisfacción las necesidades de Hospitales, Laboratorios, Instituciones de Gobierno y Clínicas, que buscan ofrecer un diagnóstico rápido y acertado.




## Acerca de la Prueba

La prueba del Antígeno Específico de la Próstata es la herramienta más valiosa disponible para el diagnóstico de cáncer de próstata temprano. Muchos estudios han confirmado que la presencia de PSA es el indicador tumoral más útil y significativo conocido para el cáncer de próstata y la infección de la próstata de la Hiperplasia Prostática Benigna (HPB).

El Dispositivo de Prueba Rápida Semi-Cuantitativa para PSA (Sangre/Suero/Plasma) utiliza una combinación de anticuerpos conjugados de oro coloidal y anti-PSA para detectar selectivamente el PSA total en sangre, suero o plasma. La prueba tiene un valor de corte de 3 ng/ml y un valor de referencia de 10 ng/ml.


## Modo de Empleo

1

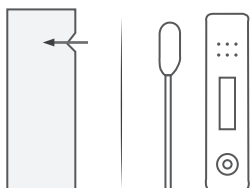


Permita que el sobre alcance temperatura ambiente antes de abrirlo.

3

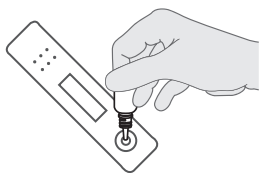

Añada 1 gota del buffer en el pocillo de muestra.

2

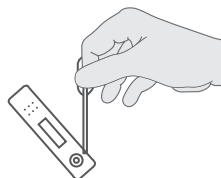

**Para las muestras de Sangre por Venopunción, Suero o Plasma:** 1 gota de suero o plasma (aproximadamente 40µL) ó 2 gotas de sangre por venopunción (aproximadamente 80µL) al pozo de muestra(S) del dispositivo de prueba.

**Para muestra de Punción en el dedo:** Llene el tubo capilar y transfiera aproximadamente 80µL de la muestra sangre del dedo al área de la muestra del dispositivo (S).

4



Espera que aparezcan las líneas teñidas. Lea los resultados a los 5 minutos. No interprete los resultados después de 10 minutos.

## Ventajas y Beneficios


- Prueba eficiente, rápida, económica y fácil de utilizar.
- Alta sensibilidad y especificidad.
- No requiere equipo de laboratorio adicional.
- Cuenta con aprobación de SSA.
- No requiere refrigeración.

## Interpretación de los Resultados

**Positivo:** Aparecen 3 líneas tanto en la línea de prueba (T) como la línea de control (C) y en la línea de referencia (R) lo cual indica un resultado positivo.

**Negativo:** Una línea roja aparece en la región de control (C) y otra en la región de la línea de referencia (R). No aparece ninguna línea en la zona de la prueba (T). Esto indica que los niveles de PSA se encuentran por debajo de los 3 ng/ml.

**Inválido:** Las líneas de control y/o de referencia no aparecen. Volumen de muestra insuficiente o incorrecta son las razones más frecuentes del fallo de la línea de control. Revise el procedimiento y repita la prueba con una nueva prueba. Si el problema persiste, deje de usar la prueba inmediatamente y póngase en contacto con su distribuidor local.

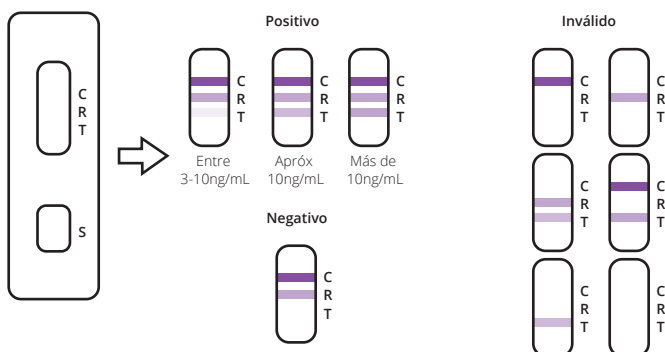

## Características

Catálogo	Parámetros	Espécimen	Formato	Presentación
TPS-402	Antígeno Específico de Próstata (PSA)	Suero /Plasma/ Sangre Entera	Cassette	Caja con 25

(81)4444 1001 | (33) 4040 1449 | [www.kabla.mx](http://www.kabla.mx)



/Kabladiagnostics



/Kablamx



/Kabla



/+Kabla

### Oficina Monterrey (Matriz)

Loma Blanca 2900 Col. Deportivo Obispedo  
Monterrey N.L. C.P. 64040

### Oficina México D.F

Av. Patriotismo #201 Piso 4, Suite 451,  
Col. San Pedro los Pinos, Delegación Benito Juárez,  
México D.F. – Cp. 03800

### Oficina Guadalajara

Bruselas 626, Col. Moderna  
Guadalajara, Jalisco, 44190