

Kaßla®

Prueba de Menopausia y Ovulación Instant-View

Pruebas en 3 diferentes formatos:
Aplicador, Cassette y Tira



Instant
View 

Prueba de Menopausia Instant-View

La prueba de Menopausia en orina Instant-View ayuda a detectar de manera cualitativa el incremento en la producción de la Hormona Foliculo Estimulante (FSH) la cual regula normalmente el desarrollo del óvulo.

Por tanto comprobar el nivel de FSH puede ayudar a determinar si una mujer se encuentra en una fase perimenopáusica.



Prueba de Ovulación Instant-View

Prueba rápida para la detección cualitativa de Hormona Luteinizante (LH) en orina para ayudar en la detección de la ovulación para auto examen.

La prueba de ovulación en orina muestra los resultados en dos minutos, además de tener una alta sensibilidad y especificidad.

La prueba de ovulación Instant-View se encuentra disponible en 3 formatos diferentes: Aplicador, tira y cassette.

Características de la Prueba



Método Fácil
y Práctico



Resultados
Rápidos



Confiable



Fácil de
Utilizar


Ventajas y Beneficios

- Resultados Rápidos y confiables.
- Alta Sensibilidad y Especificidad.
- Disponible en 3 diferentes formatos.
- No requiere equipo adicional de laboratorio.




Modo de Empleo Aplicador

- 1 Retire el dispositivo de la envoltura y destape antes de hacer la prueba.

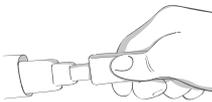

- 3 Vuelva a poner la tapa y coloque el dispositivo en una superficie plana con la ventana de resultados hacia arriba.

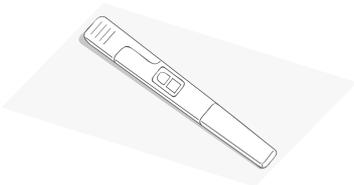

- 2 Sujete el mango y coloque la almohadilla absorbente del dispositivo en el chorro de orina durante 10 segundos.




- 4 Espere de 3 a 7 minutos para leer los resultados. No interprete los resultados como definitivos hasta después de 10 minutos.



Modo de Empleo Cassette

- 1 Utilice el gotero (incluido) para recolectar la muestra de orina, y aplique todo el contenido en la ranura de muestra.

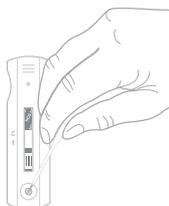


- 2 Lea el resultado después de 3-7 minutos.



5 minutos

Modo de Empleo Tira

- 1 Introduzca la prueba en una muestra de orina de 5 a 10 segundos.

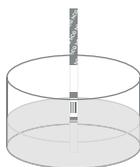

- 2 Retire la prueba y colóquela en una superficie plana.



- 3 Lea el resultado después de 3-7 minutos.



5 minutos

Información para Pedidos

Catálogo	Producto/Parámetro	Formato	Espécimen
02-2567	FSH (Menopausia)	Tira	Orina
02-2562	FSH (Menopausia)	Cassette	Orina
99-9FSH	FSH (Menopausia)	Aplicador	Orina
02-2547	LH (Ovulación)	Tira	Orina
02-2542	LH (Ovulación)	Cassette	Orina
02-2550	LH (Ovulación)	Aplicador	Orina

(81)4444 1001 | (33) 4040 1449 | www.kabla.mx

/Kabladiagnostics

/Kablamx

/Kabla

/+Kabla

Oficina Monterrey (Matríz)
Loma Blanca 2900 Col. Deportivo Obispedo
Monterrey N.L. C.P. 64040

Oficina México D.F.
Av. Insurgentes 104, Edif. El Greco
Piso 14, suite 1435
Col Juárez, Cuauhtémoc México DF 06600

Oficina Guadalajara
Bruselas 626, Col. Moderna
Guadalajara, Jalisco, 44190