


Kaßla®



Prueba de PSA Seratec

Prueba Rápida Semi-cuantitativa de Antígeno
Prostático Específico

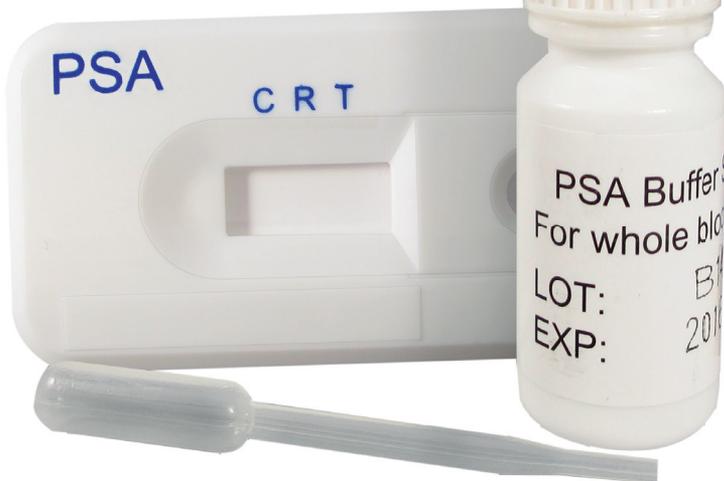

Antígeno Prostático Específico

La prueba Seratec PSA SemiQuant ha sido desarrollada para la determinación de niveles elevados de t-PSA en suero o sangre entera. Es ideal como un primer y rápido ensayo de tamizaje y ha sido diseñado como una prueba semicuantitativa que brinda resultados en menos de 10 minutos.



Acerca de la Prueba

La prueba Seratec PSA (Antígeno Prostático Específico) de suero y sangre entera es una prueba inicial de selección cualitativa para detectar la concentración de PSA igual o superior a 4 ng/ml en suero en 4 a 7 minutos. La concentración normal de PSA total en suero humano es de 0,1-2,6 ng/ml. Los informes han demostrado que los niveles elevados de PSA es el marcador tumoral más útil en el diagnóstico de cáncer de próstata.

El punto de corte en general es de 4 ng/ml. La prueba Seratec PSA en suero es de uso exclusivo profesional.



Características de la Prueba



**Método Fácil
y Práctico**



**Resultados
Rápidos**



**No Requiere
Refrigeración**




**No Requiere
Equipo Adicional**

Ventajas y Beneficios

- Prueba ideal para pruebas de tamizaje o screening.
- Brinda resultados semi-cuantitativos.
- Fácil y sencilla de utilizar.
- No requiere equipo adicional de laboratorio.
- Resultados rápidos y confiables solo en 10 minutos.

Modo de Empleo

- 1 Muestra de sangre entera.

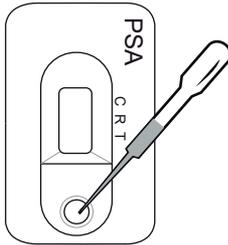


- + 2 Gotas de Sangre
+ 2 Gotas de Buffer (solución)

1. Agregue 2 gotas de sangre en el pocillo de muestra y después agregue 2 gotas de la solución proporcionada (buffer).

2. Lea el resultado del test después de 10 minutos.

- 2 Muestra de suero.

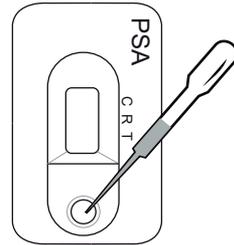


- + 2 Gotas de Suero
+ 2 Gotas de Buffer (solución)


1. Agregue 3 gotas de suero en el pocillo de muestra y después agregue 2 gotas de la solución proporcionada (buffer).

2. Lea el resultado del test después de 10 minutos.

Interpretación de Resultados

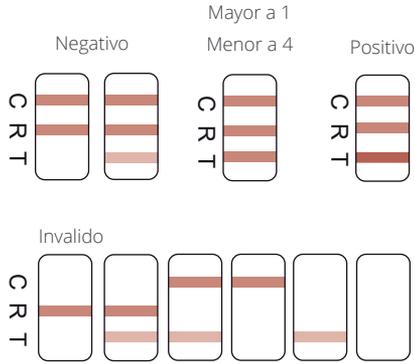

Características de Desempeño

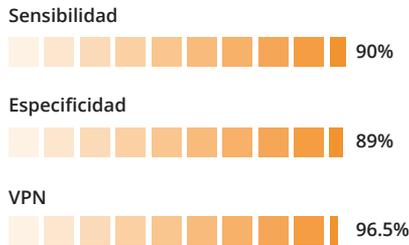

Información para Pedidos

Catálogo	Producto/Parámetro	Muestra	Formato	Presentación
PSM400T/40	Antígeno Prostático Específico	Sangre/Suero	Cassette	c/ 40 pruebas