





Acerca de la Prueba Rápida de Troponina I Instant-View



La prueba **Instant-View™ de Troponina I** es un inmunoensayo de flujo lateral para la detección rápida y cualitativa de **Troponina I** en sangre entera o suero. Esta prueba es para utilizarse como una ayuda en el diagnóstico de **infarto agudo al miocardio (AMI).**

La prueba **Instant-View™** fabricada por **Alfa Scientific Designs Inc.** en los Estados Unidos, esta aprobada para su venta en México, cuenta con FDA 510(k) en los Estados Unidos por y esta marcada CE en Europa.

La Troponina I es un marcador cardiaco que demuestra una **alta sensibilidad y especificidad** en casos de AMI (infarto agudo al miocardio)), caracterizada por su temprana aparición y una ampliaventana de detección.


Esta prueba es **97% precisa** y puede proveer resultados tan pronto como en **10** minutos.

La prueba esta disponible para muestras de **sangre entera o suero** en formato cassette.

Modo de Empleo



Tome la muestra de sangre o suero

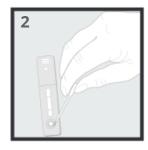

Deposite la muestra de sangre o suero en el pocillo utilizando el gotero incluido.




Lea los resultados después de 10 minutos.



Rápida: Resultados en solo 10 minutos Ideal para situaciones de urgencia Alta confiabilidad: 97% precisa Sensible: Punto de corte 1.5 ng/ml Económica Útil en clínicas pequeñas/remotas para ayudar a detectar infartos en casos que lo ameriten. No requiere equipo o instrumental de laboratorio Fácil de usar

Interpretación de Resultados

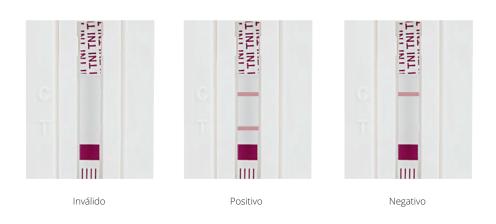

La prueba de Troponina I provee resultados cualitativos. Un método de ensayo cuantitativo deberá ser utilizado para determinar las concentración en caso de un resultado positivo.

Información para Pedidos

Catálogo	Producto	Sensibilidad	Espécimen	Presentación
05-8575	Troponina I	1.5 ng/mL	sangre o suero	25 Pruebas