



Prueba Rápida de Embarazo

Prueba rápida para la detección de la hormona Gonadotropina Coriónica humana (HCG)



Kaβla[®]

Artron
Laboratories Inc.



**HECHO EN
CANADÁ**

Artron Laboratories Inc. es un fabricante líder de pruebas rápidas de flujo lateral in vitro que han revolucionado el mercado de diagnóstico de enfermedades. La compañía fabrica todos sus productos en Canadá, además de contar con la certificación ISO 9001/13485, y su planta de producción está avalada por la FDA y Health Canada. Los productos innovadores de diagnóstico de Artron Laboratories se caracterizan por ser precisos y confiables, además de ofrecer una alta simplicidad para su uso.



El Kit de Prueba para Gonadotropina Coriónica Humana (HCG) es un rápido y conveniente ensayo inmunocromatográfico in vitro para la detección de la hormona HCG en el suero/plasma u orina. La prueba proporciona un resultado cualitativo visual que ayuda en el diagnóstico temprano del embarazo. El juicio médico y la experiencia clínica deben ser consultados para evaluar más a fondo los resultados de esta prueba.



Ventajas y Beneficios



Método Fácil y Práctico



Resultados Rápidos



No Requiere Refrigeración




No Requiere Equipo Adicional

- Resultados en menos de 10 minutos.
- No requiere equipo adicional de laboratorio.
- Producto hecho en Canadá.

Modo de Empleo



1. Retirar el dispositivo de prueba del sobre sellado desgarrando por la ranura de apertura y colocar el dispositivo de prueba en una superficie uniforme.

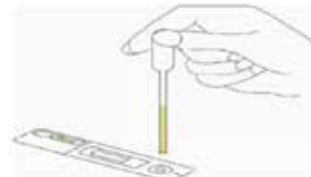

2. Sostener el gotero de muestra verticalmente y añadir tres gotas completas (120 µl) de muestra sin burbujas de aire en el pocillo de muestra que está marcado con una flecha en el dispositivo de prueba.



3. Leer los resultados después de 10 minutos. Leer los resultados como se muestran bajo la sección de "Interpretación de Los Resultados"

KABLA DIAGNÓSTICOS

Oficina Monterrey (Matríz)

Teléfono: (81) 4444 1001
Loma Blanca #2900 Col. Deportivo Obispedo
Monterrey N.L. C.P. 64040

Oficina Ciudad de México

Teléfono: (55) 9130 0575
Avenida Revolución 356 San Pedro de los Pinos
C.P 03800 4to piso. Ciudad de Mexico

Oficina Guadalajara

Teléfono: (33) 4040 1449
Bruselas #626, Col. Moderna Guadalajara, Jalisco, C.P. 44190
www.kabla.mx