

Kaßla®

Prueba de HIV-Exacto Pro®

La prueba de HIV 1, 2 + O



%99.52 sensibilidad
%98.85 especificidad

Exacto®



HECHO EN
FRANCIA

La prueba para la detección de anticuerpos contra **HIV-1 y HIV-2 - Exacto Pro®** es un inmunoensayo cualitativo in vitro de un solo uso, rápido y de flujo continuo, para la detección de anticuerpos contra el virus de inmunodeficiencia humana tipo 1 y tipo 2 en sangre humana total con EDTA, sangre de punción dactilar, suero o plasma con EDTA.

Usted puede determinar si una muestra presenta anticuerpos de HIV en solo <10 minutos con una sensibilidad mayor a 99.6%, a partir de solo 5µl de sangre capilar.



Características

- Alta Sensibilidad y Especificidad.
- Límites de Detección para especímenes positivos de VIH 1 y 2 (Incluido subtipo O)
- Antígeno propietario del HIV.
- Precisión. Los especímenes se identificaron correctamente la mayor parte del tiempo.
- Reactividad Cruzada. No hay reacción cruzada con especímenes positivos.
- Se añadieron sustancias interferentes a muestras negativas y positivas en el ensayo sin interferencia alguna.
- Validada por el INDRE.
- Registrada en COFEPRIS.
- Empaque individual (Cada kit Incluye 1 Prueba en Sobre Laminado con lanceta, buffer, apósito, toalla alcoholada, inserto y gasa).

Beneficios de la Prueba



Rápida

La prueba ofrece resultados en solo 10 minutos



Flexible

Fácil de incluir en una variedad de modelos de flujo de trabajo



Compatible


Coherente con la mayoría de los protocolos diagnósticos a escala mundial




Conveniente

Se puede almacenar a una temperatura de 2-30°C


Modo de Empleo

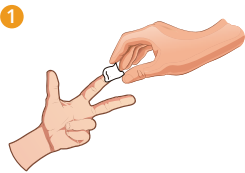

1.- Desinfecte la punta del dedo y seque con la almohadilla.

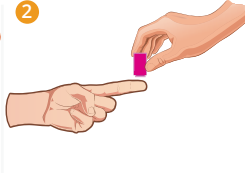


2.- Aplique la lanceta en el área desinfectada y dispárela para pinchar la piel.

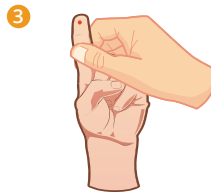


3.- Oprimir suavemente el dedo para formar una gota redondeada de sangre sobre el sitio de punción.



4.- Recolectar la sangre poniéndola en contacto con el vaso invertido.

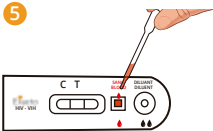

5.- Deposite inmediatamente la gota de sangre en el pocillo cuadrado del cassette con la leyenda **BLOOD B.**

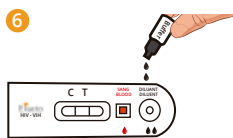


6.- Destape el gotero C. Deposite dos gotas sobre el pocillo circular del cassette con la leyenda **DILUENT B.**




7.- Espere **10 minutos** para leer el resultado. No lea los resultados si ya han transcurrido más de **20 minutos.**

Interpretación de Resultados

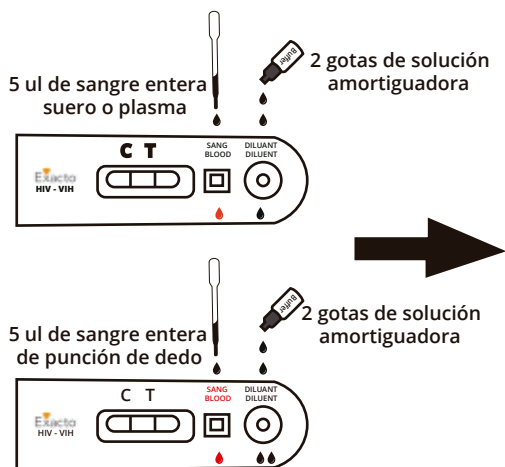


POSITIVA:

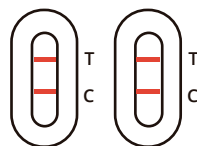

NEGATIVA:



INVALIDA:

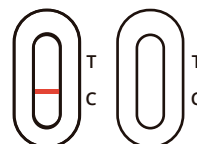

Información para Pedidos

Catálogo	Presentación	Contenido
XTPRHV	1 Prueba de VIH/1, VIH/2 - Exacto Pro®	<p>Producto a granel</p> <ul style="list-style-type: none"> · 1 Prueba de VIH/1, VIH/2 - Exacto Pro® · 1 sobre de aluminio con cartucho y desecante · 1 pipeta plástica de copia invertida · 1 bandita adhesiva · 1 lanceta · 1 frasco gotero con solución amortiguadora · 1 gasa estéril · 1 toallita con alcohol
		<p>Producto individual</p> <ul style="list-style-type: none"> · 1 sobre de aluminio con cartucho y desecante · 1 pipeta plástica de copia invertida · 1 bandita adhesiva · 1 lanceta · 1 frasco gotero con solución amortiguadora · 1 gasa estéril · 1 toallita con alcohol