

# Kaßla®

## Hepatitis A - CERTUM®

Una prueba rápida para la detección en un paso de anticuerpos IgM a Hepatitis A en suero/plasma



**CERTUM**  
DIAGNOSTICS

## Acerca de CERTUM®

Certum® Diagnostics tiene como objetivo cubrir con un alto grado de satisfacción las necesidades de Hospitales, Laboratorios, Instituciones de Gobierno y Clínicas, que buscan ofrecer un diagnóstico rápido y acertado.




## Acerca de la Prueba

La prueba en un paso para **HAV IgM** es un rápido ensayo inmunocromatográfico para la detección cualitativa de anticuerpos IgM contra el virus de la **Hepatitis A (HAV)** en muestras de Suero/Plasma como apoyo en el diagnóstico del Virus de la **Hepatitis A**.


## Modo de Empleo

1

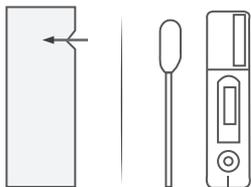


Permita que el sobre alcance temperatura ambiente antes de abrirlo.

2

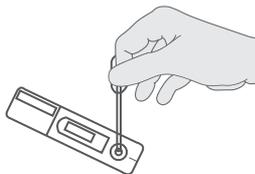

Añada 10 µl de la muestra de suero/plasma al pocillo de muestra.

3

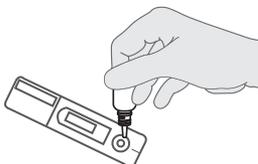

Añada 100µl o 2-3 gotas del buffer en el pocillo de muestra.

4



Espere que aparezcan las líneas teñidas. Lea los resultados a los 15 minutos. No interprete los resultados después de 20 minutos.

## Ventajas y Beneficios


- Prueba eficiente, rápida, económica y fácil de utilizar.
- Alta sensibilidad y especificidad.
- No requiere equipo de laboratorio adicional.
- Cuenta con aprobación de SSA.
- No requiere refrigeración.

## Interpretación de los Resultados

**Positivo:** Aparecen dos líneas color púrpura tanto en la línea de prueba (T) como la línea de control (C) lo cual indica un resultado positivo.

**Negativo:** Solo aparece una línea de color en la línea de control (C) lo que indica un resultado negativo.

**Inválido:** Si no aparecen líneas color púrpura en la línea de control (C) esto indica un proceso de ensayo incorrecto o falla del kit. Lea atentamente las instrucciones y repita la prueba con un nuevo kit. Si el problema persiste, deberá inmediatamente dejar de usar los kits con el mismo No. de Lote y contactar a su proveedor local.

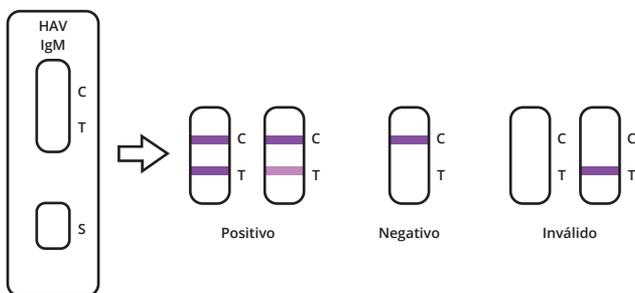

## Características

Catálogo	Parámetros	Espécimen	Formato	Presentación
IHA-402	Hepatitis A (HAV)	Suero /Plasma	Cassette	Caja con 25

(81)4444 1001 | (33) 4040 1449 | [www.kabla.mx](http://www.kabla.mx)



/Kabladiagnostics



/Kablamx



/Kabla



/+Kabla

### Oficina Monterrey (Matriz)

Loma Blanca 2900 Col. Deportivo Obispedo  
Monterrey N.L. C.P. 64040

### Oficina México D.F

Av. Insurgentes 104, Edif. El Greco  
Piso 14, suite 1435  
Col Juárez, Cuauhtémoc México DF 06600

### Oficina Guadalajara

Bruselas 626, Col. Moderna  
Guadalajara, Jalisco, 44190