



Prueba Rápida de Chikungunya IgG/IgM

Inmunoensayo cualitativo basado en membranas para la detección de anticuerpos IgG e IgM contra Chikungunya.



15
aniversario

Kaßla®
2004 - 2019

CERTUM
DIAGNOSTICS

Prueba Rápida de Chikungunya IgG/IgM

Para la detección cualitativa de anticuerpos IgG e IgM contra Chikungunya en muestras humanas de sangre entera, suero o plasma.

Acerca de CERTUM

CERTUM es una marca que ofrece una amplia gama de kits de pruebas de diagnóstico innovadores que ayudan a brindar respuestas a los profesionales de la salud. Los productos CERTUM ofrecen precisión, simplicidad y velocidad para el diagnóstico temprano y el monitoreo de afecciones médicas comunes, incluyendo pruebas para la detección de drogas de abuso, embarazo, marcadores cardiacos, marcadores tumorales y pruebas de enfermedades infecciosas entre otros. Los productos de diagnóstico CERTUM se usan fuera del cuerpo humano y requieren poco o ningún equipo especial.

CERTUM tiene como misión mejorar el bienestar del paciente, reduciendo los costos y tiempos totales de los resultados de exámenes de diagnóstico, manteniendo la calidad y estándares altos esperados por los profesionales de la salud. CERTUM tiene una participación de mercado importante en hospitales, laboratorios de referencia, centros de investigación, consultorios médicos, servicios de salud ocupacional y programas de salud pública debido a su precisión, asequibilidad y facilidad de uso.

Acerca de la Prueba


La prueba Chikungunya IgG/IgM Rapid Test Cassette (Sangre entera/Suero/Plasma) es un rápido inmunoensayo cromatográfico para la detección cualitativa de anticuerpos IgG e IgM contra Chikungunya en muestras humanas de sangre entera, suero o plasma.

Beneficios

- Prueba eficiente, rápida, económica y fácil de utilizar.
- Alta sensibilidad y especificidad.
- No requiere equipo de laboratorio adicional.
- Cuenta con aprobación de SSA.
- No requiere refrigeración.



Modo de Empleo

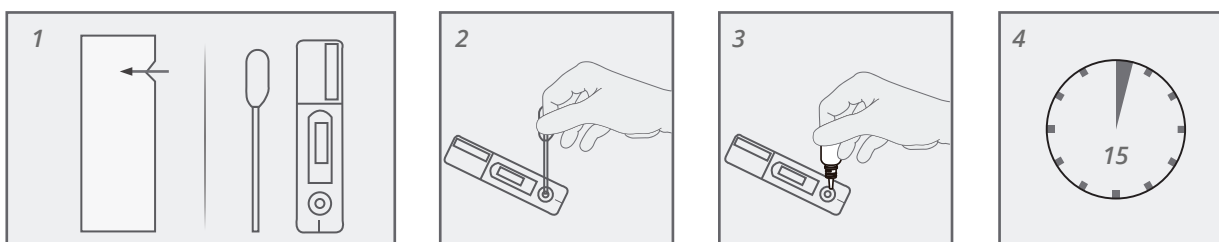

- 1.- Permita que el sobre alcance la temperatura ambiente antes de abrirlo.
- 2.- **Suero o Plasma:** Añada 25µl (1 gota) de la muestra de suero/plasma al pocillo de muestra. **Sangre Entera:** Añada 50µl (2 gotas) de la muestra de sangre entera al pocillo de muestra.
- 3.- Añada 80µl o 2-3 gotas del buffer en el pocillo de muestra.
- 4.- Espere que aparezcan las líneas teñidas. Lea los resultados a los 15 minutos. No interprete los resultados después de 20 minutos.

Información para Pedidos

Registro sanitario: 0761R2019 RSSA

Catálogo	Producto	Especimen	Contenido
ICHI-402	Certum- Prueba Rápida de Chikungunya IgG/IgM Cassette	Suero /Plasma/Sangre	25 Piezas

KABLA DIAGNÓSTICOS

Oficina Monterrey (Matríz)

Teléfono: (81) 4444 1001
Loma Blanca #2900 Col. Deportivo Obisado
Monterrey N.L. C.P. 64040

Oficina Ciudad de México

Teléfono: (55) 9130 0575
Av. Revolución #356, Col. San Pedro de los Pinos,
Ciudad de México. C.P. 03800

Oficina Guadalajara

Teléfono: (33) 4040 1449
Bruselas #626, Col. Moderna Guadalajara, Jalisco, C.P. 44190
www.kabla.mx