

D-dimer Rapid Test Cassette

Una prueba rápida para la detección cualitativa de D-dímero en sangre entera, o plasma. Sólo para uso profesional en diagnóstico in vitro.



Kaßla[®]

CERTUM
DIAGNOSTICS

D-dimer Rapid Test Cassette

Una prueba rápida para la detección cualitativa de D-dímero en sangre entera, o plasma. Sólo para uso profesional en diagnóstico in vitro.

Acerca de CERTUM

CERTUM es una marca que ofrece una amplia gama de kits de pruebas de diagnóstico innovadores que ayudan a brindar respuestas a los profesionales de la salud. Los productos CERTUM ofrecen precisión, simplicidad y velocidad para el diagnóstico temprano y el monitoreo de afecciones médicas comunes, incluyendo pruebas para la detección de drogas de abuso, embarazo, marcadores cardiacos, marcadores tumorales y pruebas de enfermedades infecciosas entre otros. Los productos de diagnóstico CERTUM se usan fuera del cuerpo humano y requieren poco o ningún equipo especial.

CERTUM tiene como misión mejorar el bienestar del paciente, reduciendo los costos y tiempos totales de los resultados de exámenes de diagnóstico, manteniendo la calidad y estándares altos esperados por los profesionales de la salud. CERTUM tiene una participación de mercado importante en hospitales, laboratorios de referencia, centros de investigación, consultorios médicos, servicios de salud ocupacional y programas de salud pública debido a su precisión, asequibilidad y facilidad de uso.

Acerca de la Prueba


El D-dimer Rapid Test Cassette, es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección cualitativa de D-dímero humano en sangre o plasma como ayuda en el diagnóstico de la Coagulopatía Intravascular Diseminada (DIC), trombosis venosa profunda (TVP) y embolia pulmonar (PE).

Beneficios

- Prueba eficiente, rápida, económica y fácil de utilizar.
- Alta sensibilidad y especificidad.
- No requiere equipo de laboratorio adicional.
- Cuenta con aprobación de SSA.
- No requiere refrigeración.



Modo de Empleo

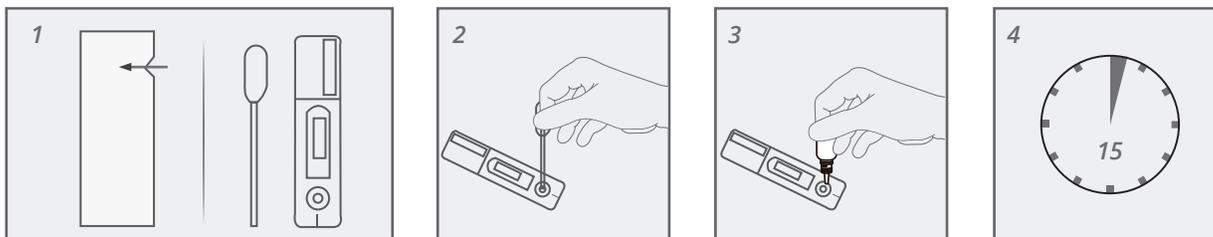

- 1.- Permita que el sobre alcance la temperatura ambiente antes de abrirlo.
- 2.- **Suero o Plasma:** Añada 25µl (1 gota) de la muestra de suero/plasma al pocillo de muestra. **Sangre Entera:** Añada 50µl (2 gotas) de la muestra de sangre entera al pocillo de muestra.
- 3.- Añada 80µl o 2-3 gotas del buffer en el pocillo de muestra.
- 4.- Espere que aparezcan las líneas teñidas. Lea los resultados a los 15 minutos. No interprete los resultados después de 20 minutos.

Información para Pedidos

Registro sanitario: 1773R2019 SSA

| Catálogo | Producto | Espécimen | Contenido |
|----------|------------------------------------|----------------------|--|
| CDM-402 | Certum D-dimer Rapid Test Cassette | Sangre Entera/Plasma | 10 Cassettes 10 Goteros 1 Buffer |

KABLA DIAGNÓSTICOS

Oficina Monterrey (Matríz)

Teléfono: (81) 4444 1001
Loma Blanca #2900 Col. Deportivo Obisado
Monterrey N.L. C.P. 64040

Oficina Ciudad de México

Teléfono: (55) 9130 0575
Av. Revolución #356, Col. San Pedro de los Pinos,
Ciudad de México. C.P. 03800

Oficina Guadalajara

Teléfono: (33) 4040 1449
Bruselas #626, Col. Moderna Guadalajara, Jalisco, C.P. 44190
www.kabla.mx