

Kaßla®

Chagas - CERTUM®

Prueba rápida para la detección de IgG anti-Trypanosoma cruzi (T. cruzi) en sangre entera, suero o plasma.



CERTUM
DIAGNOSTICS

Acerca de CERTUM®

Certum® Diagnostics tiene como objetivo cubrir con un alto grado de satisfacción las necesidades de Hospitales, Laboratorios, Instituciones de Gobierno y Clínicas, que buscan ofrecer un diagnóstico rápido y acertado.




Acerca de la Prueba

La prueba rápida de Chagas en cassette (sangre entera/suero/plasma) es un inmunoensayo cualitativo basado en membrana para la detección de IgG anti-Trypanosoma cruzi (T. cruzi) en sangre entera, suero o plasma. La membrana se pre-recubre con un anticuerpo recombinante de ratón anti-IgG humana en la región de línea de prueba del casete. Durante la prueba, las muestras de sangre entera, suero o plasma reaccionan con el antígeno Chagas recombinante conjugado con oro coloidal.


Modo de Empleo

1

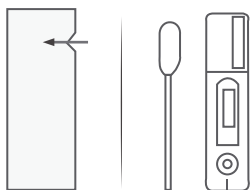

Permita que el sobre alcance temperatura ambiente antes de abrirlo.


2

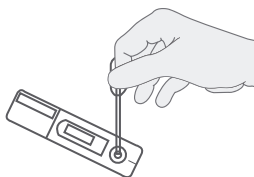

Suero o Plasma: Añada 25µl (1 gota) de la muestra de suero/plasma al pocillo de muestra

Sangre Entera: Añada 50µl (2 gota) de la muestra de sangre entera al pocillo de muestra

3

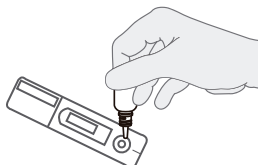

Añada 80µl o 2-3 gotas del buffer en el pocillo de muestra.

4



Espere que aparezcan las líneas teñidas. Lea los resultados a los 15 minutos. No interprete los resultados después de 20 minutos.

Ventajas y Beneficios


- Prueba eficiente, rápida, económica y fácil de utilizar.
- Alta sensibilidad y especificidad.
- No requiere equipo de laboratorio adicional.
- Cuenta con aprobación de SSA.
- No requiere refrigeración.

Interpretación de los Resultados

Positivo: Aparecen dos líneas color púrpura tanto en la línea de prueba (T) como la línea de control (C) lo cual indica un resultado positivo.

Negativo: Solo aparece una línea de color en la línea de control (C) lo que indica un resultado negativo.

Inválido: Si no aparecen líneas color púrpura en la línea de control (C) esto indica un proceso de ensayo incorrecto o falla del kit. Lea atentamente las instrucciones y repita la prueba con un nuevo kit. Si el problema persiste, deberá inmediatamente dejar de usar los kits con el mismo No. de Lote y contactar a su proveedor local.

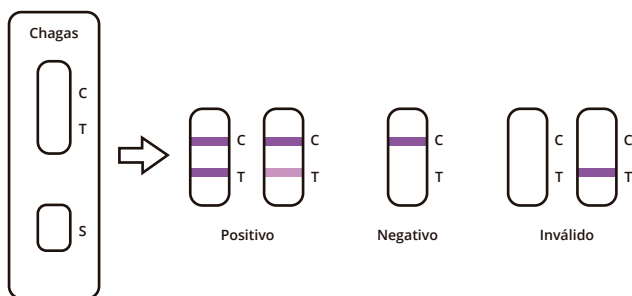

Características

Catálogo	Parámetros	Espécimen	Formato	Presentación
ICHA-402	Chagas	Suero /Plasma/Sangre	Cassette	Caja con 25

(81)4444 1001 | (33) 4040 1449 | www.kabla.mx



[/Kabladiagnostics](#)



[/Kablamlx](#)



[/Kabla](#)



[/+Kabla](#)

Oficina Monterrey (Matriz)

Loma Blanca 2900 Col. Deportivo Obispado
Monterrey N.L. C.P. 64040

Oficina México D.F

Av. Patriotismo #201 Piso 4, Suite 451,
Col. San Pedro de los Pinos, Delegación
Benito Juárez, México D.F. - Cp. 03800

Oficina Guadalajara

Bruselas 626, Col. Moderna
Guadalajara, Jalisco, 44190