


Kaßla®

Prueba de Sífilis (ANTI-TP) TOYO

Prueba ultra sensible de un solo paso para la detección de anticuerpos de Sífilis (anti-treponema pallidum) en muestra de sangre total/suero/ plasma

 Hecho en Turquía

- Altamente Sensible
- Resultados en 15 Minutos
- No requiere Buffer
- Ideal para compañías de tamizaje

TOYO® TÜRKLAB

Acerca de Sífilis

A pesar del desarrollo de métodos de tratamientos eficientes, la Sífilis todavía persiste como una enfermedad de transmisión sexual común en muchas regiones del mundo. Esta enfermedad es causada por el *Treponema pallidum* que es un miembro de las familias de las espiroquetas. La infección de tipo treponema es transmitida por contacto directo con lesión activa. Las lesiones primarias y secundarias de transmisión sexual de sífilis son altamente infecciosas y contienen una alta cantidad de organismos hasta el periodo de curación. La sífilis congénita sucede cuando el *Treponema pallidum* es transmitido de una mujer embarazada con sífilis a su feto en las últimas fases del embarazo demostrable a la infección es la producción de anti-treponema IgM específico, el cual puede ser detectado hasta el final de la segunda semana de la infección; anti treponema IgG aparece después, alrededor de 4 semanas. Para cuando los síntomas se desarrollan, la mayoría de los pacientes tienen IgG e IgM detectables.

El uso de esta prueba rápida es altamente ventajoso, debido a la dificultad de la aplicación técnica y el alto costo de varias otras pruebas de treponema.

Prueba de Sífilis (ANTI-TP) TOYO

La prueba de Anti-Sífilis de TOYO es un ensayo rápido inmuno-cromatográfico para la detección cualitativa de anticuerpos de *Treponema* (IgA, IgM, IgG) generados contra antígenos del *Treponema pallidum* (17kDa, 15kDa, 47 kDa) en muestras de suero/plasma/sangre total con alta sensibilidad y especificidad. Esta prueba puede ser usada inclusive en la detección de sífilis congénita con la misma exactitud.



Características



**Confianza en los
Resultados**



Rápida




Fácil de Usar

Ventajas y Beneficios

- Detección cualitativa de los anticuerpos generados en contra los antígenos 17 kDa, 15 kDa, 47 kDa
- Detección temprana de sífilis congénita
- Detección sífilis congénita
- Sensibilidad: 99.9%, Especificidad: 99.8%

Modo de Empleo

- 1 Utilice el gotero (incluido) para recolectar la muestra, y aplique 3 gotas en la ranura de muestra del cassette.

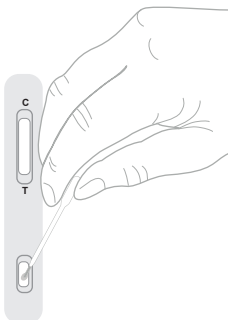


- 2 Lea el resultado después del 5 minutos.



5 minutos

- 3 Resultados

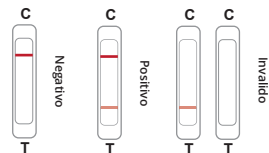

Información para Pedidos

Catálogo	Parámetro	Espécimen	Formato	Contenido
TTP02	Prueba de sífilis	Sangre/Suero/Plasma	Cassette	caja con / 50 pruebas
TTP02-Ind	Prueba individual Sífilis	Sangre/Suero/Plasma	Cassette	Incluye: - prueba - lanceta, - curita - inserto <i>Todo en sobre laminado.</i>

(81) 4444 1001 | (33) 4040 1449 | www.kabla.mx



/Kabladiagnostics



/Kablamx



/Kabla



/+Kabla

Oficina Monterrey (Matríz)

Loma Blanca 2900 Col. Deportivo Obispedo
Monterrey N.L., C.P. 64040

Oficina Ciudad de México

Av. Patriotismo #201 Piso 4, Suite 451,
Col. San Pedro de los Pinos, Delegación
Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03800

Oficina Guadalajara

Bruselas 626, Col. Moderna
Guadalajara, Jalisco, C.P. 44190