

# Kaßla®

## Prueba Rápida de Microalbuminuria Artron

Prueba Rápida para la detección  
semi-cuantitativa de la albúmina sérica humana




 **Artron**  
Laboratories Inc.



HECHO EN  
CANADÁ

Artron Laboratories Inc. es un fabricante líder de pruebas rápidas de flujo lateral in vitro que han revolucionado el mercado de diagnóstico de enfermedades. La compañía fabrica todos sus productos en Canadá, además de contar con la certificación ISO 9001/13485, y su planta de producción está avalada por la FDA y Health Canada. Los productos innovadores de diagnóstico de Artron Laboratories se caracterizan por ser precisos y confiables, además de ofrecer una alta simplicidad para su uso.

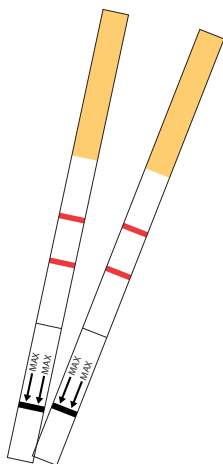

### Acerca de la Prueba

La prueba de microalbuminuria (MAU) en un solo paso de Artron es un rápido y conveniente ensayo inmunocromatográfico que se utiliza para la detección semi-cuantitativa de la albúmina sérica humana (HSA, por sus siglas en inglés) en muestras de orina humana a una concentración de 5 µg/ml-100 µg/ml. Esta prueba está destinada al uso profesional para la detección temprana de la microalbuminuria.

Cofepris



### Características de la Prueba



**Método Fácil  
y Práctico**



**Resultados  
Rápidos**



**No Requiere  
Refrigeración**



**No Requiere  
Equipo Adicional**

## Ventajas y Beneficios

- Resultados en menos de 10 minutos.
- No requiere equipo adicional de laboratorio.
- Producto hecho en Canadá.


## Modo de Empleo

1



1. Retire el dispositivo de prueba de la envoltura metálica y sostener la tira por el extremo de color.

2

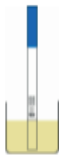


2. Sumergir la tira dentro de la muestra con la flecha apuntando hacia ésta. No sumergir después del límite de línea "MAX LINE"

3



3. Retirar la tira cuando la muestra haya migrado hacia la ventanilla de prueba (alrededor de 10 segundos) y colocar la tira (con el lado de Max hacia arriba) sobre una superficie plana, limpia, seca y no absorbente.

4

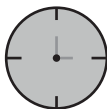

4. Lea los resultados en 15 minutos.

## Información para Pedidos

Catálogo	Producto/Parámetro	Muestra	Formato	Presentación
A08-01-113	Microalbuminuria	orina	Tira	c/ 50 pruebas

(81)4444 1001 | (33) 4040 1449 | [www.kabla.mx](http://www.kabla.mx)

 /Kabladiagnostics

 /Kablamx

 /Kabla

 /+Kabla

**Oficina Monterrey (Matríz)**  
Loma Blanca 2900 Col. Deportivo Obispedo  
Monterrey N.L. C.P. 64040

**Oficina México D.F**  
Av. Patriotismo #201  
Piso 4, Suite 451, Col. San Pedro  
de los Pinos, Delegación Benito Juárez,  
México D.F. – Cp. 03800

**Oficina Guadalajara**  
Bruselas 626, Col. Moderna  
Guadalajara, Jalisco, 44190