

Kaßla®

Prueba de Embarazo Instant-View

Prueba de embarazo en 3 diferentes formatos:
Aplicador, Cassette y Tira



Instant
View 

Acerca de Instant-View

La marca Instant-View es sinónimo de alta calidad y prestigio.

Usted puede confiar en Instant-View ya que es un producto fabricado en los Estados Unidos por Alfa Scientific Designs, Inc. empresa que mantiene la certificación ISO 13485 para los fabricantes de dispositivos médicos y cada examen ha sido certificado por la FDA y la Comunidad Europea.



Prueba de Embarazo Instant-View



Detecte Hormonas hCG en tiras individuales, cassettes y aplicador.

Esta prueba de embarazo se basa en la detección de la Gonadotropina Coriónica Humana (hCG) en orina y suero. hCG es una hormona producida por la placenta.

En personas normales, el hCG provee una indicación temprana de embarazo.

La Prueba de Embarazo Combo utiliza un anticuerpo monoclonal de ratón específico al hCG en un inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral en un paso para detectar hCG en el nivel cercano o mayor a 25 mIU/ml (WHO 3rd IS 75/537).

Características de la Prueba



**Método Fácil
y Práctico**



**Resultados
Rápidos**



Confiable




**Fácil de
Utilizar**

Ventajas y Beneficios


- **Sensibilidad:** La Prueba de Embarazo Instant-View desplegará resultados positivos con especímenes que contengan hCG en un nivel cercano o mayor a 25 mIU/ml. La prueba está estandarizada al WHO 3rd IS 75/537
- **Precisión:** La prueba de embarazo Instant-View fue evaluada en 3 Laboratorios Médicos de Oficio por personas con perfiles educativos y experiencias de trabajo diferentes. Los resultados fueron iguales para los 3 laboratorios en un 100%
- **Especificidad:** La sub-unidad de hTSH, hLH, y hFSH es similar a aquella de hCG, lo cual puede causar cross-reactividad entre dichas hormonas. Concentraciones fisiológicas altas de TSH (hasta 1,000 μ IU/ml), hLH (hasta 300 mIU/ml), y hFSH (hasta 1,000 mIU/ml) rociada en hCG positiva (rociada con 25 mIU/ml) y especímenes negativos fueron probados por separado con la prueba de embarazo Instant-View y no afectaron los resultados esperados de dicho estudio.

Modo de Empleo Aplicador

- 1 Retire el dispositivo de la envoltura y destape antes de hacer la prueba.

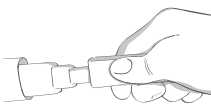


- 3 Vuelva a poner la tapa y coloque el dispositivo en una superficie plana con la ventana de resultados hacia arriba.

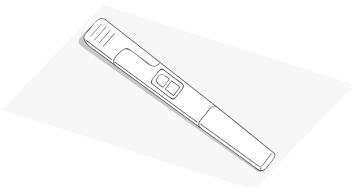

- 2 Sujete el mango y coloque la almohadilla absorbente del dispositivo en el chorro de orina durante 10 segundos.




- 4 Espere de 3 a 7 minutos para leer los resultados. No interprete los resultados como definitivos hasta después de 10 minutos.

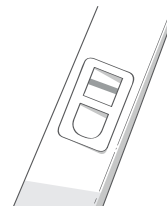

Modo de Empleo Cassette

- 1 Utilice el gotero (incluido) para recolectar la muestra de orina, y aplique todo el contenido en la ranura de muestra.

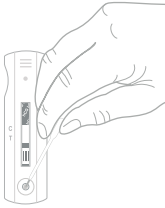


- 2 Lea el resultado después de 3-7 minutos.



5 minutos

Modo de Empleo Tira

- 1 Introduzca la prueba en una muestra de orina de 5 a 10 segundos.

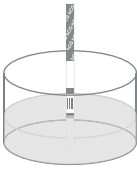

- 2 Retire la prueba y colóquela en una superficie plana.



- 3 Lea el resultado después de 3-7 minutos.



5 minutos

Información para Pedidos

Catálogo	Producto/Parámetro	Formato	Espécimen
02-2487	hCG(Embarazo)	Tira	Orina
02-2486	hCG(Embarazo)	Cassette	Orina
02-2450	hCG(Embarazo)	Aplicador	Orina
02-2487	hCG(Embarazo)	Tira	Orina/Suero
02-2484	hCG(Embarazo)	Cassette	Orina/Suero

(81)4444 1001 | (33) 4040 1449 | www.kabla.mx

/Kabladiagnostics

/Kablamx

/Kabla

/+Kabla

Oficina Monterrey (Matríz)
Loma Blanca 2900 Col. Deportivo Obispedo
Monterrey N.L. C.P. 64040

Oficina México D.F.
Av. Insurgentes 104, Edif. El Greco
Piso 14, suite 1435
Col Juárez, Cuauhtémoc México DF 06600

Oficina Guadalajara
Bruselas 626, Col. Moderna
Guadalajara, Jalisco, 44190