



1

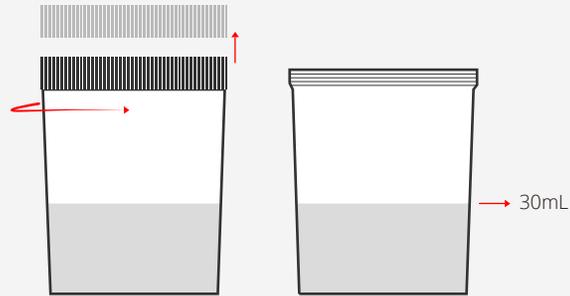


Recolecte al menos 30mL de muestra de orina en un frasco.

2

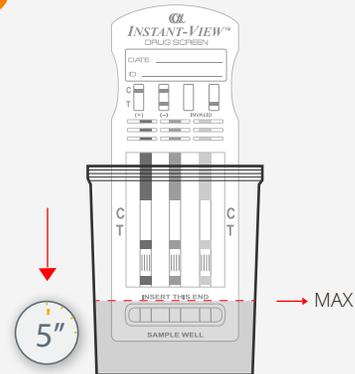


Inserte la prueba en el frasco hasta que la orina llegue al límite indicado. **IMPORTANTE: NO SOBREPASAR EL LIMITE.**

3

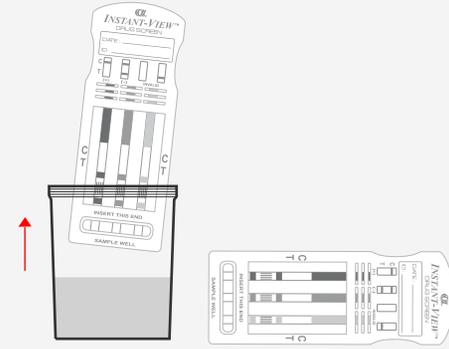

Retire y coloque en una superficie plana.


4

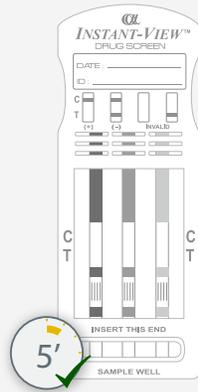


Lea los resultados a los 5 minutos.
NO ESPERE MÁS DE 10 MINUTOS.

5

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

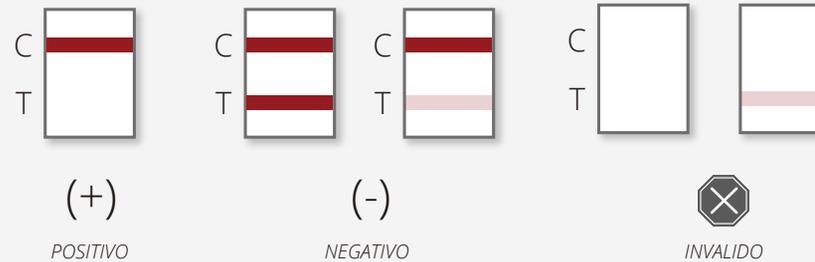


1

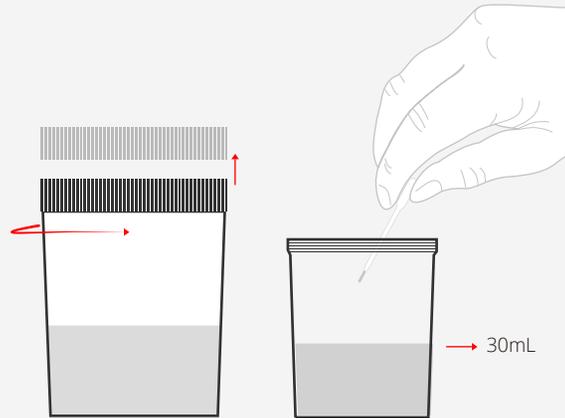


Recolecte al menos 30mL de muestra de orina en un frasco.

2

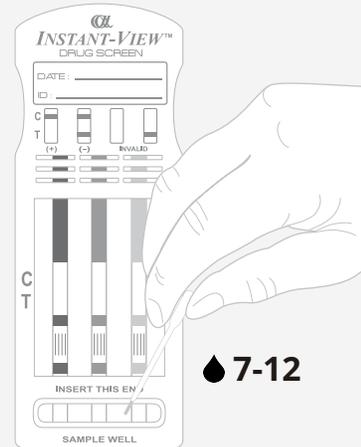

Agregue de 7 a 12 gotas de orina en la ranura de la prueba.

3

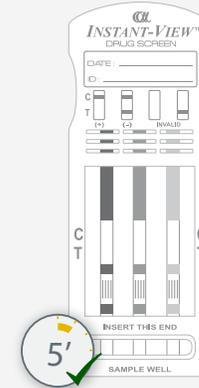

Lea los resultados a los 5 minutos. NO ESPERE MÁS DE 10 MINUTOS.

4

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS




(+)

POSITIVO



(-)

NEGATIVO

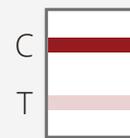

INVALIDO